

Lactate SCOUT - Mode d'emploi

Avant utilisation de l'appareil lire avec attention les renseignements concernant le mode d'emploi et les informations supplémentaires.

1. Bandelettes

Sortez une bandelette réactif de son récipient et introduisez-la dans le Lactate Scout:

Si le code du récipient est différent de celui sur l'écran, rectifiez le code de l'appareil!



Pour adapter le code, ressortez la bandelette-réactif de l'appareil et relancez le Lactate Scout en choisissant le mode „set code“

2. Lancettes

Dévissez la micro-lancette et introduisez une nouvelle lancette stérile. Enlevez le capuchon protecteur sans fausser l'aiguille et refermez bien la pièce qui est devant la micro-lancette.



Pour éviter tout risque d'infection, utilisez une nouvelle lancette à chaque mesure. Pour des autres personnes, opérez avec des gants.

3. Prélèvement

Lavez le lieu du prélèvement (doigt ou lobe de l'oreille) avec de l'eau et désinfectez le soigneusement. Armez la micro-lancette, posez-la et déclenchez-la. Cueillez une goutte de sang avec la bandelette réactif.



Transpiration ou restes d'antiseptiques sont susceptibles de fausser la mesure. Evitez de mettre la bandelette au contact de la peau.

Lactate SCOUT - Mode d'emploi

Avant utilisation de l'appareil lire avec attention les renseignements concernant le mode d'emploi et les informations supplémentaires.

4. Mesure

La mise en route est indiquée par „LAC” sur l'écran et le résultat s'affichera dans les 15 secondes. Si les chiffres est au-dessus de la valeur, l'écran affiche „Hi”, est-il au-dessous „Lo”, et „Er” si il y a une erreur.



Annulation de la mesure: Tournez le scroll sur „dEL”, appuyez brièvement „- - -”. Sortez la bandelette et éteignez le Lactate Scout.

5. Réglages

Activez le Lactate Scout en pressant le scroll 1 seconde sans avoir inséré une bandelette. En tournant le scroll vous pouvez faire défiler les différentes options que vous pouvez choisir en appuyant le scroll.



set code:

installation du code

Snd:

puissance du son

clc:

chrono

mem:

mémoire de la mesure

dAt:

date / heure

cdn:

countdown

dSC:

contrôle de fonction

dur:

durée d'étape

Eteignez Lactate Scout en pressez le scroll 3 secondes, ou bien automatiquement après 5 minutes de non-usage.

6. Rapport

Plus d'information sont dans le mode d'emploi ou sur Internet www.lactatescout.com:

En cas de doute répétez la mesure avec une nouvelle bandelette. Si le problème persiste, contactez nous.

Er 1:

bandelette-réactif impropre

bat:

changer les batteries

Er 2:

échantillon insuffisant



température trop basse / haute

Er 3:

pas de contact avec bandelette

Er 4:

contrôle de fonction négatif

Er 5:

température trop basse / haute

Er 6:

faute d'électronique

aucune indication: L'écran s'éteint après 5 minutes si la bandelette est introduite.

Appuyez le scroll sans bandelette, et après 1 sec appuyez encore une fois.

Gardez le récipient des bandelettes toujours bien fermé. Veillez au bon entreposage de l'appareil et des bandelettes (temp. et humidité)